



Produktidentifikation

Handelsname	TOXAPREVENT® MEDI PLUS Stick
Applikationsform	Pulver im Stick
Anwendung	oral
Einstufung	Medizinprodukt
Klassifizierung	Klasse IIa
Hersteller	FROXIMUN® AG
Straße / Postfach	Neue Straße 2a
Nat.-Kenn. / PLZ / Ort	DE - 38838 Schlanstedt
Telefon	+49 (0) 39401 - 632-0
E-Mail / Web	info@froximun.ag, www.froximun.de
Kontaktdaten des Sicherheitsbeauftragten	Tel.: +49 (0) 39401 - 632 320 Fax: +49 (0) 39401 - 632 55 320 mobil: +49 (0) 151 - 113 175 16 E-Mail: ellen.goerner@froximun.ag



Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung TOXAPREVENT® MEDI PLUS in Pulverform ist ein natürliches Medizinprodukt auf MANC® Basis, einem mineralischen Wirkstoff mit dem PLUS an Calcium- und Magnesiumcarbonat. Es dient der Stärkung der Darmwandbarriere bei wiederkehrender Belastung. Das Produkt regeneriert die Darmschleimhaut und unterstützt dadurch Ihre Darmgesundheit. Der Wirkstoff MANC® durchläuft den Verdauungstrakt, entfaltet dort seine physikalische Wirkung und wird nicht verstoffwechselt.

Hauptanwendung *Zur Stärkung Ihrer Darmwand:*

- Als Schutzbarriere vor Reiz- und Schadstoffen, wie Ammonium, biogenen Aminen (Histamin) und Schwermetallen (Blei, Quecksilber).
- Bei bestehenden Reizungen im Darm und daraus folgenden Histamin- und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
- Zur Unterstützung und Förderung einer gesunden Darmfunktion, die Basis für ein stabiles Immunsystem.

Produktinfo

	TOXAPREVENT® MEDI PLUS / 10 Sticks	TOXAPREVENT® MEDI PLUS / 30 Sticks
Packungsinhalt	10 Sticks, Gebrauchsinformation	30 Sticks, Gebrauchsinformation
Inhalt pro Stick	3000 mg	3000 mg
Inhaltsstoffe	MANC® (modifizierter, aktivierter, natürlicher Clinoptilolith), Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat	MANC® (modifizierter, aktivierter, natürlicher Clinoptilolith), Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat
Verwendbarkeit	4 Jahre	4 Jahre



Produktcodes

	TOXAPREVENT® MEDI PLUS 10 Sticks	TOXAPREVENT® MEDI PLUS 30 Sticks
PZN	12412601	12380427
EAN	4035303130181	4035303130150
Art.-Nr.	11001053	11001051

**Empfohlener Verkaufspreis
inkl. 19 % MwSt.**

	TOXAPREVENT® MEDI PLUS 10 Sticks	TOXAPREVENT® MEDI PLUS 30 Sticks
Preis	14,85	36,00 €

Ihre Vorteile

- Schadstoffausleitung ohne Nebenwirkungen
- 100 % natürlich
- glutenfrei
- laktosefrei
- keine chemischen Zusatzstoffe

**Calciumcarbonat und
Magnesiumcarbonat**

- allergenfrei
- als koscher und halal anerkannt

Bitte beachten Sie

- Um unerwünschte Wechselwirkungen mit Medikamenten zu vermeiden, ist ein Abstand von 2 Stunden einzuhalten, da keine systematischen Untersuchungen zu Wechselwirkungen oder Beeinflussungen von Medikamenten durch die Einnahme von TOXAPREVENT® MEDI PLUS in Pulverform vorliegen. Sollten Sie Medikamente einnehmen, stimmen Sie den zeitlichen Abstand der Einnahme von TOXAPREVENT® MEDI PLUS bitte mit Ihrem Arzt oder Therapeuten ab.
- Auf Grund sonstiger unzureichender Untersuchungen an schwangeren Frauen sowie stillenden Müttern soll auf die Einnahme von TOXAPREVENT® Medizinprodukten während der Schwangerschaft sowie der Stillzeit verzichtet werden.

Lagerung und Verwendbarkeit

- außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- trocken und zwischen 5°C - 40°C lagern
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- nicht länger verwenden als angegeben
- verwendbar bis: siehe Faltschachtel und / oder Stick

Anwendungshinweis












- Falls von Ihrem Arzt oder Therapeuten nicht anders verordnet, den Inhalt eines Sticks 1 bis 2 mal täglich in ausreichend Flüssigkeit (200 ml stillem Wasser oder Tee) einrühren und 30 Minuten vor einer Hauptmahlzeit oder vor dem Zubettgehen trinken.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene Tageseinnahme von 2 Sticks, ohne Ihren Arzt oder Therapeuten konsultiert zu haben.
- Die Dauer der Behandlung mit TOXAPREVENT® MEDI PLUS sollte 30 Tage nicht überschreiten. Bei wiederholter Einnahme sollte eine Anwendungspause von mindestens einer Woche eingehalten werden. Bitte beachten Sie die im Produkt beiliegende Gebrauchsinformation.



Qualitätsstandard und zulassungsrechtliche Aspekte

Genehmigung	Herstell- und Vertriebsgenehmigung nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang II, Artikel 3 (vollständiges Qualitätsmanagementsystem), Registrier-Nr.: HD 60105631 0001.
Zertifikat	TÜV Rheinland bestätigt die Normenkonformität für integriertes vollständiges Qualitätsmanagementsystem für Medizinprodukte nach der Forderung entsprechend der ISO Norm: EN ISO 13485:2012+AC:2012
Konformitätsbewertungsstelle	TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Germany
Koscher/Halal	Wir bestätigen hiermit, dass das oben genannte Produkt in einem Prozess aus mineralischen und pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird. Das Produkt enthält keine tierischen Bestandteile, Blut oder dessen Nebenprodukte oder Alkohol.
Transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE/BSE)	Bei der Produktion des oben genannten Produktes kommen ausschließlich Rohstoffe mineralischen, pflanzlichen oder synthetischen Ursprungs zum Einsatz. Das Produkt enthält keinerlei Bestandteile tierischer oder menschlicher Herkunft. Daher kann das Risiko einer Verunreinigung mit BSE/TSE ausgeschlossen werden.
Bestrahlung	Das Produkt oder die verwendeten Rohstoffe wurden während Produktion, Lagerung oder Versand nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt.
Rückstellmuster	Hiermit wird bestätigt, dass von dem oben genannten Produkt Rückstellmuster jeder Charge verfügbar sind. Diese werden mindestens bis zum Ablauf der Mindesthaltbarkeit aufbewahrt.
Rückverfolgbarkeit	Hiermit wird bestätigt, dass ein System zur Rückverfolgbarkeit implementiert wurde, das es erlaubt, sämtliche Produktchargen innerhalb der Lieferkette zu verfolgen.

Warn- und Sicherheitshinweise

 Symbol: Hersteller	 Symbol: Grüner Punkt (Duales System Deutschland)	 Symbol: außer Reichweite von Kindern aufbewahren
 Symbol: LOT, Chargennummer	 Symbol: trocken aufbewahren	 Symbol: CE- Kennzeichnung inkl. Nummer Zertifizierungsstelle
 Symbol: Verwendbar bis	 Symbol: vor Sonnenlicht schützen	 Symbol: trocken und zwischen 5°C - 40°C lagern
 Symbol: Gebrauchsinformation beachten	 Symbol: in Flüssigkeit einrühren	